



Gebrauchsanweisung Einlagen, individuelle Sonderanfertigung

Informationen und Hinweise zum Gebrauch des angefertigten Hilfsmittels !

- Ihre Einlage ist ein Hilfsmittel, das speziell für Sie und nach der Verordnung Ihres Arztes erstellt wurde.
- Prüfen Sie Ihre Einlagen vor jeder Verwendung auf den richtigen Sitz im Schuh.
- Beachten Sie beim Einlegen der Einlagen in den Schuh auf die richtige Seitenzuordnung (links / rechts)
- Laufen Sie bei einer Erstversorgung die Einlagen in den ersten Tagen ggf. erst stundenweise ein.
- Melden Sie sich bei Beschwerden umgehend bei unseren Mitarbeitern.
- Verwenden Sie ihre Einlagen nur in Schuhen mit passender Größe, Länge und Weite.
- Achten Sie bei darauf, Schuhe ohne Fußbett zu verwenden, damit die Einlage im Schuh auf glatter Brandsohle aufliegt. Gerne prüfen wir Ihre Schuhe auf die entsprechende Eignung !!
- Kontrollieren Sie regelmäßig Ihrer Füße. Achten Sie dabei auf Druckstellen und Hautverfärbungen. Sollten Sie Unregelmäßigkeiten feststellen, melden Sie sich umgehend bei unseren Mitarbeitern.
- Lassen Sie Ihre Einlagen über Nacht ablüften. Nehmen Sie die Einlage hierfür ggf. aus den Schuhen. Besonders bei starker Schweißbildung !!
- Trocknen Sie ggf. durchfeuchtete Einlagen bitte langsam. Legen Sie sie nicht direkt auf die Heizung, Mikrowelle, Ofen oder direkt in die Sonne.
- Reinigen Sie Ihre Kunststoff- oder Mikrofaserbezogenen Einlagen regelmäßig mit einem angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie niemals scharfe oder ätzenden Reinigungsmittel.

Wichtige Hinweise:

- Kindereinlagen sollten regelmäßig (spätestens nach 3 Monaten) durch einen Fachmann auf Wirkung und Passform geprüft werden. Optimale Wirkungsweise besteht nur bei optimaler, richtiger Passform !!
- Lassen Sie Ihre Einlage bei neurologischen (z.B. Diabetes, Neuropathie...) alle 6 Monate prüfen.
- Bei Beschwerden durch die Nutzung der Einlagen oder Defekten an Ihren Einlagen verwenden Sie sie auf keinen Fall ohne Rücksprache mit unseren Mitarbeitern oder Ihrem behandelnden Arzt !!
- Bitte führen Sie selbst an Ihren Einlagen keinen Änderungen, Umarbeitungen oder Reparaturen durch!

Zentrale

Reha Technik Medizintechnik

*Im Langental 10
66539 Neunkirchen
Tel. :06821 / 90860
Fax :06821 / 908666*

Orthopädietechnik Sanitätshaus

*Hebbelstraße 5-7
66538 Neunkirchen
Tel. :06821 / 22476
Fax :06821 / 210345*

Sanitätshaus

*Kaiserstraße 27
66386 St. Ingbert
Tel. :06894 / 92610
Fax :06894 / 926121*