



Gebrauchsanweisung Mieder / Leibbinde, individuelle Sonderanfertigung

Informationen und Hinweise zum Gebrauch des angefertigten Hilfsmittels !

- Ihr Mieder / Ihre Leibbinde ist ein Hilfsmittel, das speziell für Sie und nach der Verordnung Ihres Arztes erstellt wurde.
- Prüfen Sie Ihr Mieder / Ihre Leibbinde vor jeder Verwendung auf ordnungsgemäßen Zustand und Funktion.
- Tragen Sie bitte immer ein Baumwollhemd oder Baumwoll T-Shirt unter Ihrem Mieder / Ihrer Leibbinde.
- Achten Sie auf den richtigen Sitz des Mieders / der Leibbinde.
- Achten Sie darauf, das Mieder / die Leibbinde NICHT VERKEHRT ODER VERDREHT anzuziehen.
- Achten Sie darauf, das der Bauch richtig und von vorne / unten gefasst wird.
- Sollte eine Rückenpelotte eingearbeitet sein, achten Sie bitte darauf, das diese der gewünschten Wirkungsweise / Höhe entsprechend sitzt.
- Schließen Sie die Verschlüsse / Schnürung gleichmäßig fest zum korrekten Sitz.
- Achten Sie ggf. auf eine Gewichtsabnahme oder Gewichtszunahme !!!
- Tragen Sie Ihr Hilfsmittel so, wie vom Arzt gewünscht und / oder wie es von Ihnen benötigt wird.
- Kontrollieren Sie regelmäßig ihre Haut. Achten Sie dabei auf Druckstellen und Hautverfärbungen. Sollten Sie Unregelmäßigkeiten feststellen, melden Sie sich umgehend bei unseren Mitarbeitern. Führen Sie möglichst täglich eine Hautpflege durch.
- Reinigen Sie Ihre Orthese, auch innenliegende mit der Haut in Kontakt kommende Teile, regelmäßig mit geeigneten Reinigungsmitteln und / oder den Angaben unserer Mitarbeiter. Verwenden Sie niemals scharfe oder ätzende Reinigungsmittel.
- Schließen Sie zur Reinigung (...Handwäsche bei 30 Grad) die Verschlüsse und entfernen Sie ggf. die Rückenpelotte. Reinigen Sie die Rückenpelotte ggf. separat.
- Vergessen Sie nicht die ggf. entfernte Pelotte nach der Einigung / dem Trocknen wieder einzusetzen.
- Trocknen Sie Ihr Hilfsmittel bitte langsam. Legen Sie es nicht direkt auf die Heizung, in die Mikrowelle, Ofen oder direkt in die Sonne.
- Vermeiden Sie hohe Temperaturen, Schlageinwirkungen oder direkte Wassereinwirkung

Wichtige Hinweise:

- Bei Passformproblemen sollte Ihr Hilfsmittel durch einen Fachmann geprüft werden.
- Bei Schäden am Mieder / an der Leibbinde nutzen Sie diese AUF KEINEN FALL ohne die Rücksprache mit dem zuständigen Techniker.
- Zu Anpassungen und Umänderungen bringen Sie bitte ggf. Ihren Servicepass mit.
- Bitte führen Sie selbst an Ihrem Hilfsmittel keinen Änderungen, Umarbeitungen oder Reparaturen durch!

Zentrale

Reha Technik Medizintechnik

Im Langental 10
66539 Neunkirchen
Tel. :06821 / 90860
Fax :06821 / 908666

Orthopädietechnik Sanitätshaus

Hebbelstraße 5-7
66538 Neunkirchen
Tel. :06821 / 22476
Fax :06821 / 210345

Sanitätshaus

Kaiserstraße 27
66386 St. Ingbert
Tel. :06894 / 92610
Fax :06894 / 926121