



Gebrauchsanweisung Beinorthesen, individuelle Sonderanfertigung

Informationen und Hinweise zum Gebrauch des angefertigten Hilfsmittels !

- Ihre Orthese ist ein Hilfsmittel, das speziell für Sie und nach der Verordnung Ihres Arztes erstellt wurde.
- Prüfen Sie Ihre Orthese vor jeder Verwendung auf ordnungsgemäßen Zustand und Funktion.
- **ACHTUNG** : Bei Gelenken die eine Sperrfunktion eingebaut haben - Prüfen Sie diese vor dem Anlegen der Orthese auf korrekte Funktion.
- Legen Sie zuerst das Unterschenkelteil / Fußteil an und dann die Oberschenkelhülse.
- Achten Sie auf den richtigen Sitz Ihrer Orthese.
- Vermeiden Sie Falten und Hautquetschungen beim Anziehen !
- Schließen Sie die Verschlüsse (z.B. Klettband, Gurte oder Schnürung) gleichmäßig fest.
- Prüfen Sie nach dem Anlegen der Orthese den richtigen Sitz und festen Halt. Kontrollieren Sie die richtige Lage der Gelenkdrehpunkte.
- Verwenden Sie für ihrer Orthese nur Schuhe mit richtiger Absatzhöhe. Gerne prüfen wir Ihre Schuhe auf Eignung !
- Schützen Sie Ihre Orthese gegen zu hohe Temperaturen und Schlageinwirkungen.
- Schützen Sie Ihre Orthese und deren Gelenksysteme vor Wassereinwirkungen, es sei denn, diese ist für die Verwendung hierfür extra konzipiert worden. (Schwimm-, Badeorthesen)
- Kontrollieren Sie regelmäßig ihre Haut. Achten Sie dabei auf Druckstellen und Hautverfärbungen. Sollten Sie Unregelmäßigkeiten feststellen, melden Sie sich umgehend bei unseren Mitarbeitern. Führen Sie möglichst täglich eine Hautpflege durch.
- Trocknen Sie Ihre Orthese bitte langsam. Legen Sie sie nicht direkt auf die Heizung, in die Mikrowelle, Ofen oder direkt in die Sonne.
- Reinigen Sie Ihre Orthese, auch innenliegende mit der Haut in Kontakt kommende Teile, regelmäßig mit geeigneten Reinigungsmitteln. Verwenden Sie niemals scharfe oder ätzende Reinigungsmittel.

Wichtige Hinweise:

- Bei Passformproblemen sollte Ihre Orthese durch einen Fachmann geprüft werden.
- Bei Fehlfunktionen nutzen Sie Ihre Orthese **AUF KEINEN FALL** ohne die Rücksprache mit dem zuständigen Techniker.
- Zu Anpassungen und Umänderungen bringen Sie bitte Ihren Servicepass mit.
- Bitte führen Sie selbst an Ihrer Orthese keinen Änderungen, Umarbeitungen oder Reparaturen durch!

Zentrale

Reha Technik Medizintechnik

Im Langental 10
66539 Neunkirchen
Tel. :06821 / 90860
Fax :06821 / 908666

Orthopädietechnik Sanitätshaus

Hebbelstraße 5-7
66538 Neunkirchen
Tel. :06821 / 22476
Fax :06821 / 210345

Sanitätshaus

Kaiserstraße 27
66386 St. Ingbert
Tel. :06894 / 92610
Fax :06894 / 926121