



Gebrauchsanweisung Prothesen, individuelle Sonderanfertigung

Informationen und Hinweise zum Gebrauch des angefertigten Hilfsmittels !

- Ihre Prothese ist ein Hilfsmittel, das speziell für Sie und nach der Verordnung Ihres Arztes erstellt wurde.
- Prüfen Sie Ihre Prothese vor jeder Verwendung auf ordnungsgemäßen Zustand und Funktion.
- **ACHTUNG** : bei einer Versorgung mit Silikonliner, diesen so anlegen, das der Verschlussstift in der richtigen Position und fest eingerastet ist. Prüfen Sie dies direkt nach dem Anziehen der Prothese.
- **ACHTUNG** : bei einer Versorgung mit Silikonliner darauf achten, das beim Ausziehen und Anziehen des Liners dieser nicht durch den Verschlussstift beschädigt wird. Verwenden Sie ggf. eine Schutzkappe für den Verschlussstift !!!
- Bei einer Versorgung mit einer vacuum - Prothese achten Sie darauf das der Stumpf vollständig in der Prothese sitzt. Schließen sie das Ventil richtig damit dies auch das vacuum halten kann.
- Vermeiden Sie Falten und Hautquetschungen beim Anziehen !
- Verwenden Sie bitte nur Schuhe mit der prothetisch eingestellten Absatzhöhe. Gerne prüfen wir Ihre Schuhe auf Eignung !
- Schützen Sie Ihre Prothese gegen zu hohe Temperaturen und Schlageinwirkungen.
- Schützen Sie Ihre Prothese vor Wassereinwirkungen, es sei denn, diese ist für die Verwendung hierfür extra konzipiert worden. (Schwimm-, Badeprothesen)
- Kontrollieren Sie regelmäßig ihren Stumpf. Achten Sie dabei auf Druckstellen und Hautverfärbungen. Sollten Sie Unregelmäßigkeiten feststellen, melden Sie sich umgehend bei unseren Mitarbeitern.
- Zur Stumpfabhärtung empfehlen wir Franzbrantwein. Reiben Sie empfindliche Haut regelmäßig damit ein. **NICHT DEN EINGERIEBENEN STUMPF IN DIE PROTHESE EINFÜHREN !!** Lassen Sie Lotionen erst einziehen oder nutzen Sie diese erst abends, wenn die Prothese nicht mehr getragen wird !!!
- Lassen Sie Ihren Liner regelmäßig über Nacht auslüften.
- Trocknen Sie Ihren Liner oder Innenschaft bitte langsam. Legen Sie ihn nicht direkt auf die Heizung, in die Mikrowelle, Ofen oder direkt in die Sonne.
- Reinigen Sie Ihre Innenschäfte oder Liner regelmäßig mit geeigneten Reinigungsmitteln. Verwenden Sie niemals scharfe oder ätzende Reinigungsmittel.

Wichtige Hinweise:

- Bei Passformproblemen (z.B. Gewichtabnahme) sollte Ihre Prothese durch einen Fachmann geprüft werden.
- Bei Fehlfunktionen nutzen Sie Ihre Prothese **AUF KEINEN FALL** ohne die Rücksprache mit dem zuständigen Techniker.
- Zu Anpassungen und Umänderungen bringen Sie bitte Ihren Servicepass mit.
- Bitte führen Sie selbst an Ihrer Prothese keinen Änderungen, Umarbeitungen oder Reparaturen durch!

Zentrale

Reha Technik Medizintechnik

Im Langental 10
66539 Neunkirchen
Tel. :06821 / 90860
Fax :06821 / 908666

Orthopädietechnik Sanitätshaus

Hebbelstraße 5-7
66538 Neunkirchen
Tel. :06821 / 22476
Fax :06821 / 210345

Sanitätshaus

Kaiserstraße 27
66386 St. Ingbert
Tel. :06894 / 92610
Fax :06894 / 926121

