



Gebrauchsanweisung Sitzschalen, individuelle Sonderanfertigung

Informationen und Hinweise zum Gebrauch des angefertigten Hilfsmittels !

- Ihre Sitzschale ist ein Hilfsmittel, das speziell für Sie und nach der Verordnung Ihres Arztes erstellt wurde.
- Prüfen Sie Ihre Sitzschale / Untergestell vor jeder Verwendung auf ordnungsgemäßen Zustand und Funktion.
- **ACHTUNG** : Sitzschalen zur Verwendung mit einem Untergestell dürfen ausschließlich mit dem dafür zugelassenen oder gelieferten Untergestell verwendet werden.
- **ACHTUNG** : Zur Unfallvermeidung darf die Sitzschale nur **OHNE** Patient auf das Untergestell aufgesetzt oder abgenommen werden.
- Achten Sie beim Einsetzen des Patienten auf geschlossene Bremsen und festen Stand des Untergestells.
- Prüfen Sie nach dem Einsetzen des Patienten den korrekten Sitz und die korrekte Lagerung.
- Vermeiden Sie Falten der Kleidung und / oder des Sitzschalenbezuges im Sitz- und Rückenbereich.
- Schließen Sie die Halte- und Fixiergurte zur ordnungsgemäßen Positionierung des Patienten.
- Einen Transport im Auto ist **NUR MIT ENTSPRECHENDEN ADAPTERN UND RÜCKHALTESYSTEMEN** zugelassen und zulässig. Kontrollieren Sie ganz genau die Haltegurte und Gurtsysteme vor dem Transport.
- Kontrollieren Sie regelmäßig ihre Haut. Achten Sie dabei auf Druckstellen und Hautverfärbungen. Sollten Sie Unregelmäßigkeiten feststellen, melden Sie sich umgehend bei unseren Mitarbeitern. Führen Sie möglichst täglich eine Hautpflege durch.
- Trocknen Sie Ihre Orthese bitte langsam. Legen Sie sie nicht direkt auf die Heizung, in die Mikrowelle, Ofen oder direkt in die Sonne.
- Reinigen Sie Ihre Orthese, auch innenliegende mit der Haut in Kontakt kommende Teile, regelmäßig mit geeigneten Reinigungsmitteln. Bezüge zum Abnehmen bei 30 Grad in der Waschmaschine. Verwenden Sie niemals scharfe oder ätzende Reinigungsmittel.
- Vermeiden Sie hohe Temperaturen, Schlägeinwirkungen oder direkte Wassereinwirkung

Wichtige Hinweise:

- Untergestelle für den „Innenbereich“ sind ausdrücklich nur für den Innenbereich zulässig. Nur Untergestelle für den „Außenbereich“ dürfen auch dort genutzt werden !!
- Bei Passformproblemen sollte Ihre Orthese durch einen Fachmann geprüft werden.
- Bei Fehlfunktionen der Sitzschale / des Untergestells nutzen Sie diese **AUF KEINEN FALL** ohne die Rücksprache mit dem zuständigen Techniker.
- Zu Anpassungen und Umänderungen bringen Sie bitte Ihren Servicepass mit.
- Bitte führen Sie selbst an Ihrer Orthese keinen Änderungen, Umarbeitungen oder Reparaturen durch!

Zentrale

© Orthopädie Lattrich GmbH

Reha Technik Medizintechnik

*Im Langental 10
66539 Neunkirchen
Tel. :06821 / 90860
Fax :06821 / 908666*

Orthopädietechnik Sanitätshaus

*Hebbelstraße 5-7
66538 Neunkirchen
Tel. :06821 / 22476
Fax :06821 / 210345*

Sanitätshaus

*Kaiserstraße 27
66386 St. Ingbert
Tel. :06894 / 92610
Fax :06894 / 926121*

